

Co uvidíte.
 Co uslyšíte.
 Co uděláte.

Nápovědy, které se mohou zobrazit na LCD displeji:
 Textová sdělení
 Počítadlo výbojů
 Uplynulý čas
 Křivka EKG

začnete tady

Člověk zkolaboval – podezření na srdeční zástavu.
 Přístroj schopen provozu.
 Zapněte přístroj.
 Autotest; přístroj v pořádku.

Přístroj vybaven k zákroku u dospělých a dětských pacientů

Další nápovědy, které se mohou ozvat:

Zapoj kabel. Připojte elektrodotový kabel.

Přístroj selhal. Přístroj vypněte a poté zapněte. Pokud porucha přetrvává, proveďte KPR.

Uvolni tlačítko výboje. Pusťte tlačítko výboje.

Vyměň baterie. Vyměňte všech 10 baterií.

Dodáno (x) výbojů.

Indikátor bliká.
 Začni resuscitovat.
 Proveďte KPR: 2 vdechy na každých 30 stlačení.

Po jednom výboji...

Indikátor bliká.
 Výboj doporučen. Nedotýkej se pacienta. Stiskni tlačítko výboj.
 Vydejte pokyn Odstupte. NEDOTYKTE SE postiženého.
 Stiskněte (symbol srdce). Výboj byl dodán.

Po 2 minutách KPR...
 Přeruš KPR.

Indikátor bliká.
 Nedotýkej se pacienta. Analyzuj.

Výboj není doporučen.

Indikátor bliká.
 Přivolej pomoc.
 Přivolejte pomoc nebo pro ni pošlete.

Indikátor bliká.
 Zkontroluj vědomí.
 Zatřeste s postiženým a zakřičte "Co je vám?"

Zůstaň v klidu.

OK?

LCD displej

Indikátor bliká.
 Na holý hrudník nalep elektrody.
 Na holý hrudník přiložte postiženému dospělé nebo dětské elektrody. Postupujte podle návodu v balíčku s elektrodami.

U pacientů mladších 8 let nebo vážících < 25 kg přiložte elektrodotové polštářky podle obrázku.

Indikátor bliká.
 Uvolni dýchací cesty.
 Pacienta otočte na záda a uvolněte dýchací cesty – zakloňte mu hlavu dozadu a předsuňte bradu. Dlaň přiložte na čelo pacienta a jemně zatlačte hlavu dozadu. Konečky prstů položte pod bradu a nadzvedněte ji. Tak se otevrou dýchací cesty.
 Alternativa: Umístěte pod ramena pasivní systém uvolnění dýchacích cest (PASS), abyste zaklonili hlavu. PASS nepoužívejte, je-li podezření na poranění hlavy nebo krku.

Pokud pacient nereaguje, uvolněte dýchací cesty.

Indikátor bliká.
 Zkontroluj dýchání.

Zkontrolujte dýchání.
 Zkontrolujte, zda se pacientův hrudník zvedá. Poslechem zkontrolujte, zda pacient dýchá ústy. Vyzkoušejte, zda při výdechu ucítíte na své tváři proud vzduchu. Rozhodněte, zda pacient dýchá běžným způsobem, nestandardně či zda nedýchá vůbec.

INDIKACE PRO POUŽITÍ

Použijte, když u pacienta zjevně nastala zástava oběhu, o které svědčí:

- bezvědomí, a
- nepřítomnost normálního dýchání; a
- nepřítomnost pulzu a známek oběhu.

Pokud je postiženým osoba mladší 8 let nebo vážící méně než 25 kg, měl by se defibrilátor ZOLL AED Plus používat s dětskými elektrodami ZOLL AED Plus. Určení přesného věku nebo hmotnosti pacienta by nemělo být důvodem k opoždění zákroku.

KONTRAINDIKACE PRO POUŽITÍ

Nepoužívejte, když pacient:

- je při vědomí; nebo
- dýchá; nebo
- má hmatný pulz nebo jiné známky oběhu.

PŘEDPOKLÁDANÝ UŽIVATEL

Externí defibrilátor ZOLL AED Plus by měly používat osoby vyškolené v používání přístroje AED Plus a v provádění základní neodkladné resuscitace a rozšířené neodkladné resuscitace, příp. jiných neodkladných lékařských zákroků, a to k defibrilaci osob postižených srdeční zástavou. Součástí monitorovací funkce KPR je metronom, jehož účelem je nabádat záchranáře, aby prováděli masáž hrudníku při frekvenci 100 kompresí za minutu, což je frekvence doporučená ERC.** Hlasové a textové nápovědy nabádají k hloubce kompresí u dospělého pacienta 5 – 6 cm. Monitorovací funkce KPR není určena k použití u pacientů mladších 8 let.